

Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!





**Ohne Zink,
ohne Konservierungs-
stoffe**

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL

ohne Farb- und Geschmacksstoffe

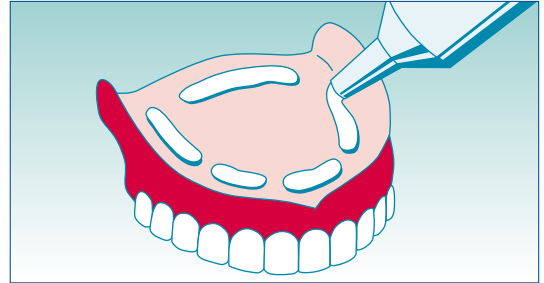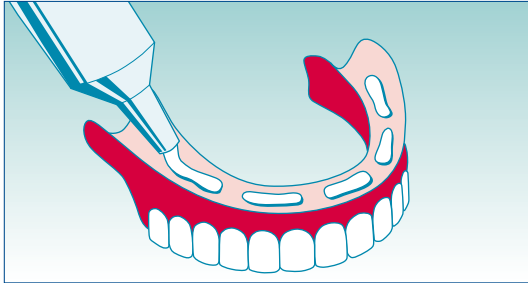

Bewährte Rezeptur: ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe. Auch für Teilprothesen geeignet.

Anwendung

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den

Kiefer. Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann. Die Anwendung von Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittlrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme **NEUTRAL** enthält:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäureanhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 10/2016.

Queisser
PHARMA



D-24914 Flensburg

www.queisser.de

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL

ohne Farb- und Geschmacksstoffe

4-fach Effekt

Neutral
Nass-Haftkraft
Starker Halt
Schutz

- 1. Neutral:** ohne Farb- und Geschmacksstoffe, daher für Allergiker geeignet, homöopathieverträglich, keine Aromaveränderung von Speisen und Getränken
- 2. Nass-Haftkraft:** direkt auf die feuchte Prothese auftragbar
- 3. Starker Halt:** Extra-Stark mit Langzeit-Wirkung
- 4. Schutz:** hilft das Eindringen von Speiseresten unter die Prothese zu verhindern, Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort.

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL sorgt für ein natürliches, sicheres Tragegefühl der Dritten, selbst bei schwierigen Haft-Problemen.

Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes
 weil die Prothese sicher und lange haftet
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

Ihre persönlichen Daten

Name _____
Straße _____
PLZ, Ort _____
Telefon _____ E-Mail _____

- Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: www.protefix.de oder E-mail: info@queisser.de.

Sind Sie zufrieden mit **Protefix®** Haft-Creme NEUTRAL?

- Ja Nein, weil _____

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und verwende **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** seit _____ Jahren.