

**Gebrauchsanweisung!**  
Bitte aufmerksam lesen!




## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen

#### Anwendungsinformation


1.

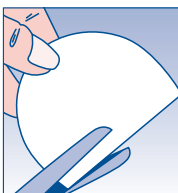

#### Oberkiefer-Prothese

Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in handwarmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.


1.

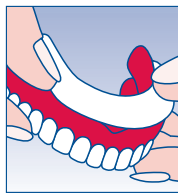

#### Unterkiefer-Prothese


Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

2.

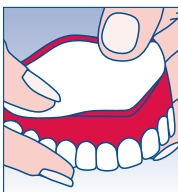

Polster auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.

2.

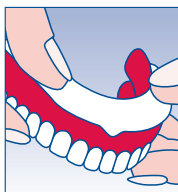

Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

#### Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

#### Wichtige Hinweise

Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Die Anwendung von Haft-Polstern sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

#### Zusammensetzung

Natriumalginat (28 %),  
Viskose-Faser, Polypropylenfaser

#### Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.



#### Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

**Protefix®** Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!



**⚠ Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).**

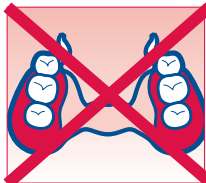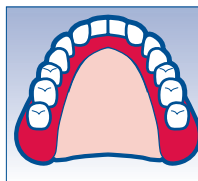

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 06/2019.

**Quaisser**  
PHARMA  
GmbH & Co. KG  
Schleswiger Straße 74  
24941 Flensburg  
Deutschland  
www.queisser.de

