


Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!




Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen


Anwendungsinformation

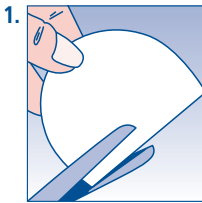


1. Oberkiefer-Prothese
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in handwarmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.

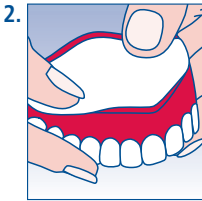

2. Polster auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt anliegt.

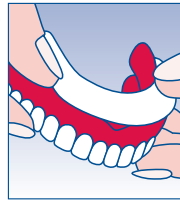

1. Unterkiefer-Prothese
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

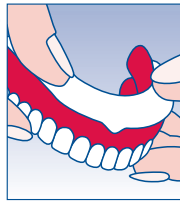

2. Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

Wichtige Hinweise

Nur auf der gesunden Schleimhaut anwenden. Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Die Anwendung von Haft-Polstern sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.

Zusammensetzung

Vlies bestehend aus Natriumalginat, Viskose-Faser, Polypropylen-Faser.

Gegenanzeigen



Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Protefix® Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).

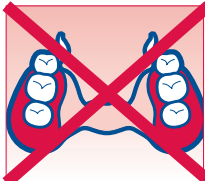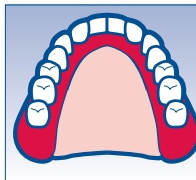

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 11/2011.



Queisser
PHARMA

D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Vertrieb in der Schweiz:
Biomed AG
Überlandstr. 199
CH-8600 Dübendorf



Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Einige Anmerkungen zur Anwendung:

- das Polster hat die richtige Größe
 das Polster ist zu groß zu klein

Warum verwenden Sie **Protefix®** Haft-Polster?

- bei mir hält nichts anderes
 ich habe (ständig) Druckschmerzen
 ich habe eine Interimsprothese
 ich probiere **Protefix®** Haft-Polster gerade aus

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 nein

Ich bin _____ Jahre alt und
 verwende **Protefix®** Haft-Polster seit _____ Jahren
 für den Oberkiefer Unterkiefer.

Ihre persönlichen Daten

Name _____
 Straße _____
 PLZ, Ort _____
 Telefon _____ E-Mail _____

- Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: www.protefix.de oder E-mail: info@queisser.de.



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel.

Das Medizinprodukt **Protefix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** **Forschung**. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspangen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem einzigartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnspanne oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.
- Ohne Alkohol.



Protefix® Wund- und Schutzgel
 gibt es nur in der Apotheke unter
 der PZN 2 651 753.



583034