




**Gebrauchsanweisung!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**

# Protefix® Wund- und Schutzgel

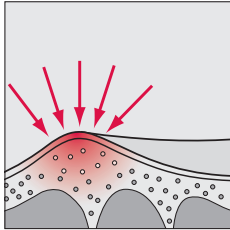

**Protefix®** Wund- und Schutzgel zum Auftragen auf die entzündete Mundschleimhaut.



## **Anwendung**

Mund ausspülen, gegebenenfalls von Prothesen-Haftmittelresten reinigen.

Ca. 3 – 4 x täglich eine erbsengroße Menge **Protefix®** Wund- und Schutzgel auf ein Wattestäbchen oder die saubere Fingerkuppe geben und auf die betroffenen Stellen auftragen, dabei leicht einmassieren.

Achten Sie bitte darauf, dass der entstehende Schutzfilm möglichst gleichmäßig verteilt wird und so nachhaltig wirken kann.

Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Den Mund unmittelbar nach der Anwendung nicht ausspülen.

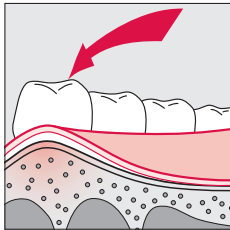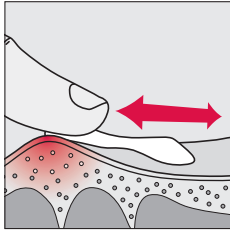

## **Zusammensetzung:**

**Protefix®** Wund- und Schutzgel enthält: Hyperoxygenated Corn Oil (92,7 %), Silica, Eugenia Caryophyllus, Sodium Saccharin, Mentha Piperita.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 08/2019.

## **Gegenanzeigen**

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

## **Nebenwirkungen**

**Protefix®** Wund- und Schutzgel soll für das angegebene Anwendungsgebiet verwendet werden, kann aber einen ärztlichen Rat nicht ersetzen. Sollten die Symptome länger als fünf Tage anhalten oder Verschlimmerung eintreten (besonders bei Blutungen oder Infektionen), empfiehlt es sich, ärztlichen oder zahnärztlichen Rat einzuholen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollte vorsichtshalber die Behandlung unterbrochen und ein Arzt aufgesucht werden. Bei großflächiger Anwendung kann an den behandelten Stellen die Wirkung von Haftmitteln beeinflusst werden. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.



**Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- **Protefix®** Wund- und Schutzgel nur gemäß der oben aufgeführten Anwendungsbeschreibung verwenden.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, um Verunreinigungen auszuschließen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.



90585098



**Protefix®** Wund- und Schutzgel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung bei Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut und Aphthen, insbesondere unter Prothesen, Teilprothesen und Zahnsparangen. Es enthält Glycerol-Oxytriestere („TGO“), das durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen wird, und besitzt ein patentiertes Wirkprinzip:

**Protefix®** Wund- und Schutzgel

- bildet einen Schutzfilm, der die Wunde vor äußeren Reizen schützt
- lindert den Schmerz
- keine negative Beeinflussung der Mundflora



## Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht für andere Zwecke an Dritte weitergegeben. Weitere umfangreiche Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten in Verbindung mit diesem Beipackzettel finden Sie hier: <https://www.queisser.de/datenschutz/bpz>  
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns: Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, E-Mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de), [www.queisser.de](http://www.queisser.de). Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich!

Wie haben Sie **Protefix®** Wund- und Schutzgel kennengelernt?

- Apotheker     Probe  
 Zahnarzt     Werbung

Wobei verwenden Sie **Protefix®** Wund- und Schutzgel?

- bei Druckstellen unter Zahnsparangen oder Prothesen  
 bei Aphthen  
 bei Entzündungen der Mundschleimhaut

Sind Sie mit der Schutzwirkung zufrieden?

- Ja     Nein, weil \_\_\_\_\_

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und verwende **Protefix®** Wund- und Schutzgel seit \_\_\_\_\_ Jahren.

### Ihre persönlichen Daten

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen sowie für Zwecke der Kundenbefragung durch die Queisser Pharma GmbH & Co. KG verwendet werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Telefonnummer nutzen wir nur im Falle einer Reklamationsbearbeitung, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen unter: [www.protefix.de](http://www.protefix.de)

