

Gebrauchsanweisung!
Bitte aufmerksam lesen!




**Ohne Zink,
ohne Konservierungs-
stoffe**

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme **PREMIUM**

Extra-Stark mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung

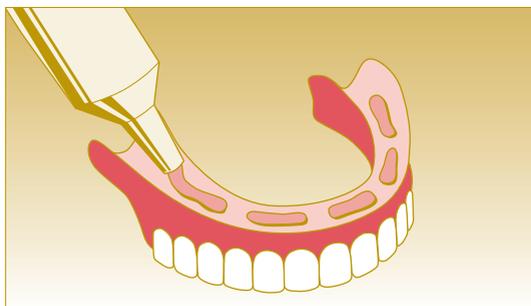

Premium-Rezeptur: Ohne Zinksalz, ohne Konservierungsstoffe. Auch für Teilprothesen geeignet.


Anwendung:

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung:

Tagesdosis: Bis zu 0,8 g Haft-Creme.

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix®** Haft-Creme **PREMIUM** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix®** Haft-Creme **PREMIUM** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

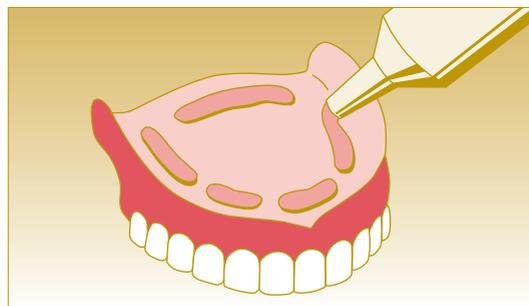

Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix®** Haft-Creme **PREMIUM** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht bei verletzter oder erkrankter Mundschleimhaut anwenden.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden Nebenwirkungen sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

⚠ Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Anwendung der Haft-Creme sollte nur zeitweilig erfolgen. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig überprüfen.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Um ein Ausölen der Haft-Creme zu verhindern, Tube vor dem Gebrauch gut durchkneten.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränktem Wattebausch entfernen.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme **PREMIUM** enthält:

Cellulose Gum (27 %), Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer (26 %), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Silica, Chamomilla Recutita, Tocopheryl Acetate, Commiphora Myrrha, Salvia Officinalis, Menthyl Lactate, Mentha Crispa, CI 14720.

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im 09/2019.



Quaisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Deutschland
www.queisser.de

